

**SHOULDER ABDUCTION PILLOW W/SLING**  
**Schulterstabilisator/-fixierer**

Gepolsterte Schulter spreizschlinge

Der V-Verschluss mit Bandagen erleichtert das Anlegen der Schlinge und verhindert ein Verrutschen des Arms.

*Mögliche Indikationen:*

- nach Bankart-Läsion / Operation
- nach Rotatorenmanschettenruptur / auch postoperativ
- nach Schulterarthroskopie
- nach Schulterluxationen

- aus mit Trikotstoff bezogenem Hartschaum, einer Schlinge aus demselben Material und mit einem Trainingsball zur Stimulierung der Durchblutung und des Lymphabflusses

**Artikelnummern**

	<b>Standardgröße</b>	<b>eng anliegend</b>	<b>neutral</b>
<b>S</b>	23-1911	23-1931	23-1921
<b>M</b>	23-1912	23-1932	23-1922
<b>L</b>	23-1913	23-1933	23-1923
<b>XL</b>	23-1914	23-1934	23-1924

**Maßtabelle für die Hüfte**

<b>S</b>	61 – 76 cm
<b>M</b>	76 – 91 cm
<b>L</b>	91 – 106 cm
<b>XL</b>	106 – 122 cm

**Maßtabelle für den Unterarm**

<b>S</b>	23 – 30 cm
<b>M</b>	30 – 38 cm
<b>L</b>	38 – 46 cm
<b>XL</b>	46 – 51 cm

Maße beziehen sich auf den Hüftumfang und die Länge des Unterarms vom Handgelenk zum Ellenbogen

**HINWEIS:** Die Schlinge ist auch separat erhältlich

Gebrauchsanweisung:

1. Trennen Sie das Polster von der Schlinge und entfernen Sie den Sicherheitsgurt von der Schlinge.
2. Öffnen Sie den Schultergurt und das Schlingenvorderteil.
3. Führen Sie den Daumen durch die kleine Schlaufe.
4. Legen Sie den Schultergurt diagonal über die gesunde Schulter und fixieren diesen durch beide Schnallen, so dass der Verschluss in der Brustmitte liegt. Die Gurtlänge kann am hinteren Teil der Armschlinge reguliert werden.
5. Setzen Sie das Polster unter der Schlinge so an der Taille an, dass das dickere Ende nach vorn zeigt. Die Neigung des Polsters kann durch Verbiegen der flexiblen Stützstrebe angepasst werden. Befestigen Sie den Plastikverschluss und korrigieren Sie die Gurtlänge hinten am Polster. Verbinden Sie es für einen sicheren Halt durch den Klettverschluss mit der Schlinge.

*(Die Polster in den Größen Standard und eng anliegend fixieren den Arm in einem Winkel von ungefähr 15° zum Körper. Der Winkel des Unterarms zur Taille kann durch Vor- oder Zurückschieben des Stützkissens verändert werden)*

Pflege und Reinigung:

*Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:*

Entfernen Sie zur Reinigung sämtliche Streben soweit möglich, schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter [info@top-medical.org](mailto:info@top-medical.org)